

Puntas de jeringa Sparkle™ de aire/agua

REF BCSAWSCL / BCSAWSWH / BCSAWS / BCSAWSB

INSTRUCCIONES DE USO

No se necesita adaptador ni convertidor con el equipo original.

1. En la mayoría de las jeringas con tuerca, afloje la tuerca de seguridad de la punta e inserte la punta de la jeringa Sparkle™ de aire/agua como si fuera una punta metálica.
2. En la jeringa de cambio rápido, presione el anillo exterior e inserte la punta de la jeringa Sparkle de aire/agua como si fuera una punta metálica.
3. Antes de usar la jeringa, asegúrese de que la punta de la jeringa Sparkle de aire/agua esté firmemente colocada. La punta de la jeringa Sparkle de aire/agua está correctamente instalada cuando no se ven líneas ni ranuras más allá de la tuerca de seguridad.



Las puntas de la jeringa Sparkle de aire/agua se envasan y sellan en un entorno limpio (no estéril).

CROSSTEX



Manufactured for: Crosstex International, Inc.
6789 W. Henrietta Road, Rush, NY 14543 USA
585.359.0130 | 631.582.6777 | HuFriedyGroup.com

EU REP MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

CH REP MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau
Switzerland

UK REP MDSS-UK RP Ltd.
Parkway House, Palatine Rd,
Northenden, Wythenshawe,
Manchester M22 4DB
United Kingdom



No fabricado con látex de caucho natural.

En el caso de que se produzca un incidente grave con nuestros dispositivos en algún país de la Unión Europea, notifique la incidencia sin dilación a Hu-Friedy Mfg. Co., LLC y al organismo nacional pertinente del Estado miembro.

Made in China

BCSAWSB-IFU-ES / REV 1-10/2025

Los nombres de productos son marcas comerciales de Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, sus afiliadas o compañías relacionadas, a menos que se indique lo contrario.

©2026 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved.