

Embouts de seringue air/eau Sparkle™

REF BCSAWSCL / BCSAWSWH / BCSAWS / BCSAWSB

MODE D'EMPLOI

Aucun adaptateur ou convertisseur n'est nécessaire avec l'équipement d'origine.

1. Sur la plupart des seringues avec écrou de verrouillage, desserrez l'écrou de verrouillage de l'embout et insérez l'embout Sparkle™ Air/Water de la même manière qu'un embout métallique.
2. Sur la seringue à changement rapide, appuyez sur la bague extérieure et insérez l'embout de seringue Sparkle Air/Eau de la même manière qu'un embout métallique.
3. Avant d'utiliser la seringue, assurez-vous que l'embout de seringue Sparkle Air/Eau est bien en place. L'embout de seringue Sparkle Air/Eau est correctement installé lorsqu'aucune ligne ni rainure n'est visible au-delà de l'écrou de blocage de l'embout.



Les embouts de seringue Sparkle Air/Eau sont conditionnés et scellés dans un environnement propre (non stérile).

CROSSTEX



Manufactured for: Crosstex International, Inc.
6789 W. Henrietta Road, Rush, NY 14543 USA
585.359.0130 | 631.582.6777 | HuFriedyGroup.com

EU REP MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

CH REP MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau
Switzerland

UK REP MDSS-UK RP Ltd.
Parkway House, Palatine Rd,
Northenden, Wythenshawe,
Manchester M22 4DB
United Kingdom



Non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel.

En cas d'accident grave impliquant nos dispositifs au sein de l'Union Européenne, veuillez en informer Hu-Friedy Mfg. Co., LLC et votre autorité nationale compétente de l'état membre.

Made in China

BCSAWSB-IFU-FR / REV 1 - 10/2025

Tous les noms de produits sont des marques déposées de Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, de ses filiales ou sociétés affiliées, sauf indication contraire.

©2026 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved.