

EL EXPLORADOR

DE HU-FRIEDY



El afilado es la mejor forma para aumentar la
longevidad de sus instrumentos.

Escoger con qué afilar puede ser una cuestión de gusto.

Soluciones de Afilado Hu-Friedy... Continúa en la [página 4](#)

How the best perform

Hu-Friedy

EL EQUIPO DE HU-FRIEDY LATINOAMÉRICA INFORMANDO DESDE LA REGIÓN



Dra. Laura Sánchez J.
Consultora de Programas Educativos América Latina

DESDE LA OFICINA DE LA EDITORA

Como lo hemos mencionado anteriormente en las ediciones pasadas de nuestro Explorador, Hu-Friedy ha ido desarrollándose como empresa a partir de tres enfoques



Hoy quiero tocar el tema de Comunidad en dos ámbitos:

- El programa de Líderes de Opinión
- Los programas educativos en la región

El programa de Líderes de opinión, está conformado por odontólogos que por sus características, personifican todo lo que Hu-Friedy representa como marca. Son Doctores apasionados por la odontología, que se desempeñan con excelencia en la especialidad a la que pertenecen. Son entusiastas de nuestros instrumentos, pero sobretodo, son personas especiales que se mueven en su ámbito y la gente los admira y sigue. El programa inició hace apenas año y medio. Hemos estado presentándolos uno a uno a la comunidad odontológica a través de nuestra revista. En este número les presentamos al Dr. Carlos Monteagudo, un periodoncista mexicano. Nuestros líderes de opinión se encuentran en todas las regiones de América Latina y son personas muy activas en la academia, investigación y trabajo clínico. En el apartado de Hu-Friedy en la región, podrán encontrar las diferentes actividades en las que ellos participan para que los puedan seguir o acompañar en sus conferencias y cursos.

Para nosotros en Hu-Friedy y en particular para mí,



es un privilegio liderar el programa y estar en contacto directo con cada uno de ellos. ¡Esperen muchas más actividades y noticias de este programa!

En cuanto a los programas educativos, les comento sobre tres diferentes aristas que tenemos en América Latina:

La primera es la capacitación en ventas para los vendedores de nuestros distribuidores. En los Seminarios de distribuidores les otorgamos herramientas que los vendedores necesitan para hacer ventas eficaces e informadas de todas nuestras líneas de instrumentos. Es importante para nosotros que los doctores que llegan a adquirir nuestros productos, salgan bien atendidos y seguros de que llevan lo que necesitan. Este año marcó una fecha especial en el pasado Seminario de distribuidores en Ciudad de México ya que cumplió su aniversario número XV.



EL EQUIPO DE HU-FRIEDY LATINOAMÉRICA INFORMANDO DESDE LA REGIÓN

La segunda es el programa de educación que tenemos especialmente diseñado para las Universidades sobre diversos temas como el control de infecciones, afilado de instrumentos de periodoncia, técnicas específicas de algunas especialidades y cuidado y mantenimiento de instrumental. Para Hu-Friedy es primordial que los estudiantes y docentes estén informados de las diferentes opciones que hay disponibles y su uso adecuado. Y lo más importante es que este es un servicio que impartimos de manera gratuita en las instituciones y a los grupos de Odontólogos que lo solicitan a los representantes de nuestra región. La compra de instrumental siempre es una inversión que debe ser bien pensada y nosotros queremos que los estudiantes que adquieran nuestro instrumental tengan soporte de nuestra parte y que logren el mejor desempeño en un ámbito de bioseguridad.




La tercera arista que tiene que ver con la educación es precisamente nuestra revista. Tenemos un apartado llamado "El conocimiento científico en América Latina" que nos permite difundir el conocimiento que consideramos importante y que nos distingue del resto del mundo. Aquí ofrecemos una oportunidad para publicar artículos, casos clínicos, descripciones de técnicas, en fin, lo que la comunidad odontológica latinoamericana considere como información valiosa. Es un espacio visualizado de forma que llegue a estar cargado de información, que la gente puede desde ya, acceder gratuitamente. Hasta el momento, hemos publicado algunos artículos propios de nuestros líderes de opinión que han aprobado esta iniciativa, pero si alguno de nuestros apreciados lectores tiene algo que le gustaría publicar, por favor no dude en comunicarse conmigo.

En fin, muchas gracias por leer nuestra revista que ya llega a ustedes en su edición número 14. Es un esfuerzo conjunto en el que participa de lleno el equipo completo de América Latina. ¡Hasta la próxima edición!

Dra. Laura Sánchez J.

Consultora de Programas Educativos América Latina
LSanchez@hu-friedy.com

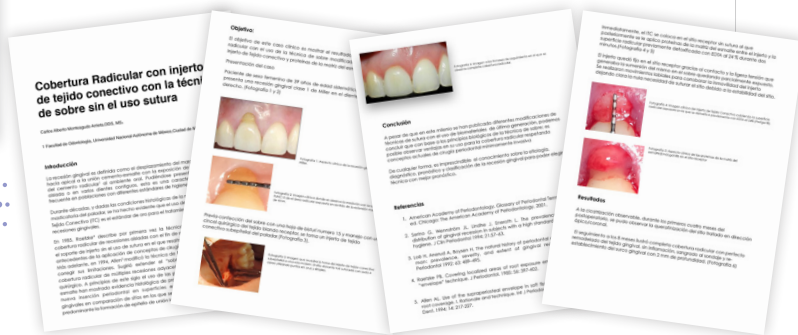

SOLUCIONES DE AFILADO

EL AFILADO ES LA MEJOR FORMA PARA AUMENTAR LA LONGEVIDAD DE SUS INSTRUMENTOS. ESCOGER CON QUÉ AFILAR PUEDE SER UNA CUESTIÓN DE GUSTO.

Factores a considerar:

¿Cada cuánto tiempo afila sus instrumentos?

¿Qué tan frecuentemente usa sus instrumentos?


¿Qué tan complicado es el cálculo a remover en los pacientes en los que usted utiliza los instrumentos?

Dependiendo del nivel de desgaste, así debe ser la piedra o equipo necesario para el afilado. Hu-Friedy, como líder en el instrumental dental, ofrece diversas soluciones a sus necesidades de afilado.

Veamos las diferentes opciones disponibles y cuándo es apropiado el uso de cada una:

PIEDRA ARKANSAS

Las piedras Arkansas son las clásicas ya que son las más antiguas en la historia dental. Por esta razón, estas piedras naturales que se extraen de las minas de Arkansas son las favoritas de las personas de tradición. Estas piedras poseen un grano muy fino y se usan para mantenimiento de rutina frecuente de instrumentos que aún no pierden su filo. Se recomienda que sean lubricadas con aceite para prevenir que las virutas de metal se incrusten en la piedra.

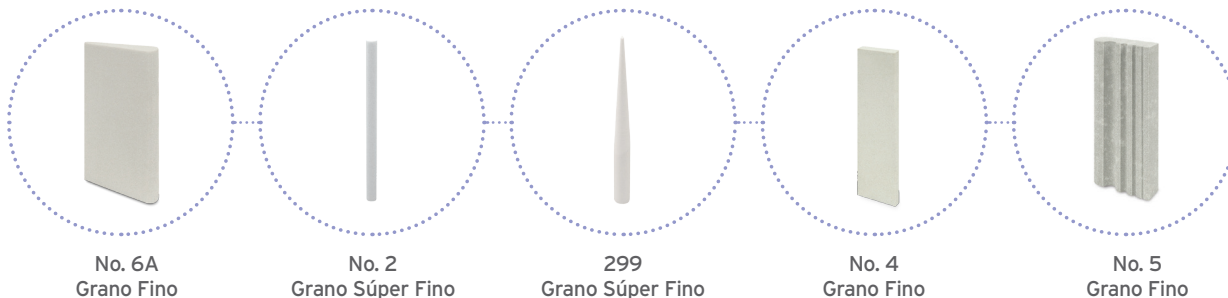

No. 6A
Grano Fino

No. 2
Grano Súper Fino

299
Grano Súper Fino


No. 4
Grano Fino

No. 5
Grano Fino

SOLUCIONES DE AFILADO

Piedras de Cerámica


Aunque las piedras de cerámica no han existido por tanto tiempo como las de Arkansas, tienen ya varias décadas. Estas piedras sintéticas están disponibles en grano fino y son ideales para personas que afilan sus instrumentos frecuentemente. También está disponible la piedra dual que es de cerámica con un lado de grano fino y el otro lado con grano mediano (para instrumentos que requieren mayor abrasividad). Aunque no es necesaria la lubricación, se recomienda utilizarla con agua.

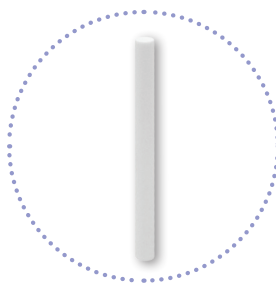

Forma Cilíndrica
Grano Fino



No. 3
Grano Mediano

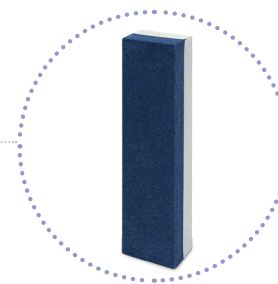


Doble Grano
Grano Grueso y Fino

Piedras I (India)


Así como las de cerámica, las piedras I también son sintéticas. Son muy abrasivas y generalmente se recomiendan para reacondicionar los instrumentos que han perdido completamente el filo. Se recomienda que después de usar la piedra I, se continúe con una piedra de grano más fino para perfeccionar el borde de corte.



No. 6
Grano Mediano

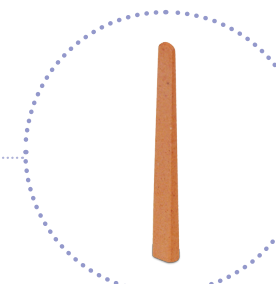

309
Grano Fino

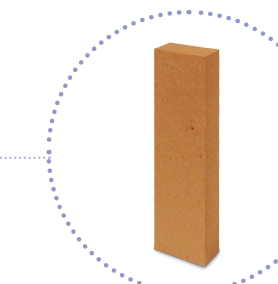

No. 1
Grano Fino

SOLUCIONES DE AFILADO

Tarjetas Diamantadas para Afilar

Estas tarjetas son la última innovación de Hu-Friedy para el afilado. Son del tamaño de una tarjeta de crédito, planas, duraderas y resistentes al desgaste y a formar canales. Aunque parecen muy diferentes a las piedras tradicionales, las tarjetas diamantadas se usan exactamente igual, con las mismas técnicas de afilado.

Están disponibles en 3 diferentes granos para cubrir todas las necesidades de afilado:

- Extra fino: Para darle el acabado a un instrumento ya previamente afilado.
- Fino: Para el mantenimiento regular de los instrumentos.
- Mediano: Para instrumentos que requieren un reacondicionamiento ya que han perdido por completo su filo. Generalmente se recomienda continuar con una tarjeta fina o extra fina para darle un buen acabado al filo.



Para ver el video dar clic en la imagen

[TARJETAS DIAMANTADAS FAQ](#)

[VIDEO TARJETAS DIAMANTADAS](#)

Afilador Sidekick

El afilador Sidekick es el equipo más conveniente y fácil de utilizar para operadores que prefieren trabajar con tecnología automatizada y más contemporánea del mercado. Esto para el mantenimiento de rutina de curetas y raspadores. El Sidekick es inalámbrico, portátil y no ocupa mucho espacio. Tiene una platina de guía con ángulos predeterminados para una colocación fácil de los raspadores, las curetas universales y las curetas Gracey. Esto permite una colocación predecible, ángulos precisos y un filo excelente todas las veces.

[AFILADOR SIDEKICK INFORMACIÓN](#)

Es importante recordar que, con cualquier producto de afilado, las técnicas correctas, y el afilado rutinario son los elementos críticos para aumentar la longevidad del instrumento y obtener el filo ideal. Una piedra o equipo puede que no sea una solución universal para todos sus instrumentos. Le aseguramos que Hu-Friedy tiene la variedad de opciones para que usted escoja según sus necesidades de afilado.

[MANUAL "ES HORA DE AFILAR"](#)



Para ver el video dar clic en la imagen

Hu-Friedy

LÍDERES DE OPINIÓN EN AMÉRICA LATINA

Entrevista con
el Dr. Carlos
Monteagudo



CARLOS ALBERTO MONTEAGUDO ARRIETA

Pais: MÉXICO

Especialidad: Periodoncia e Implantología

Educación: Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM

REDES SOCIALES:

Facebook:

[Dr.Carlos Monteagudo Periodoncia e Implantologia.](#)

Twitter: [@DrMonteagudo](#)

Instagram: [camonteagudo](#)

¿Qué música tiene en su consulta cuando trabaja?

La música forma gran parte de mi vida. Yo, a parte de ser odontólogo soy compositor por lo que la atmósfera musical es esencial para todo momento de mi día. Cuando trabajo puedo ser muy versátil, trato de preguntarle al paciente qué le gusta ya que él es el protagonista de la consulta, esto me ha llevado a tener qué programar en mi cubículo música que va desde Chopin hasta regional mexicana. Aunque yo soy más afín a la música Lounge, Chillout, pasando por el jazz, bossa nova o rock ligero.

Describe su primer día de consulta.

El primer día de consulta en mi vida profesional fue un tanto complicado hasta caótico. Yo creo que soy de las personas que no se les da todo a la primera. Así que, lo que más recuerdo de ese día es que estaba solo en el consultorio de mi padre, la compresora explotó con todas las mangueras por fuera, no sabía donde estaban algunas cosas, el paciente llegó tarde para que al final, ya que todo estaba en orden, se fuera la luz y tuviera que reprogramar esa consulta. Esto me hace mirar a mi último día de trabajo en mi clínica, el cual fue completamente diferente. Vale la pena esforzarse día con día para dar mejor atención y profesionalizarse en una carrera tan bonita como la nuestra. No todo siempre será fácil de primera instancia, nunca tenemos que dejar de prepararnos para ser mejores.

¿Si su instrumento favorito pudiera hablar, qué diría de usted?

Mi instrumento favorito es la sonda periodontal y yo creo que diría que soy un apasionado. ¡Amo el diagnóstico periodontal! La periodontología es un área de conocimiento odontológico que no es tan valorada por los pacientes y el poderlos diagnosticar, enseñar e instruir de padecimientos que ellos ignoraban es un gran reto que requiere toda la pasión y preparación.

¿Qué estaría haciendo si no fuera un odontólogo?

¡Uff! Yo creo que es la pregunta más difícil que me han hecho en estos últimos días. Yo no quería estudiar odontología, a mi me encanta escribir. Yo aprendí a leer y a escribir desde los tres años gracias a mi madre, ella es maestra de educación primaria y es conocida como "La Maestra Clarita". Ella me enseñó y me guió para escribir mis primeros cuentos y poemas. Que les puedo decir, ella es mi inspiración para poder ser profesor.

He escrito toda mi vida, y pensé que a eso me dedicaría siempre, mi primer contacto con la industria de la literatura impresa fue con un libro de poesía de mi autoría el cual me llevó a participar en una antología de poesía

Hu-Friedy

LÍDERES DE OPINIÓN EN AMÉRICA LATINA

iberoamericana editada en España en el año 2008. En fin, tengo tantas actividades que me apasionan y una de ellas es la música, que también me ocupa en un proyecto personal que lleva más de 15 años y un disco en su haber. Pero, con toda esta reflexión yo creo que si no fuera odontólogo estaría en un aula dando clases y tratando de motivar a las generaciones que vienen las cuales siento que están un tanto apáticas e incomprendidas.

¿Cuál es su actividad favorita fuera de la oficina?

Me fascina andar en bicicleta, yo me transporto en bici casi todos los días y me encanta sentir el aire entre mis manos y mi rostro. Quizá con una bicicleta, una guitarra en mi espalda y un libro en mi bolsillo pueda ser el hombre más feliz.

¿Cuál ha sido su caso más memorable?

El caso más memorable fue el que presenté en el congreso Euro-Perio 8 en la ciudad de Londres, Inglaterra, en el año 2015. Tuvo gran significado para mí y fue un gran trabajo. Desgraciadamente en América Latina no se tiene una cultura científica. Publicar un artículo académico puede ser una actividad nada valorada por la sociedad. Aún me veo encerrado en mi hotel, en una ciudad como Londres con miles de cosas que ver, repasando con mi limitado inglés lo que presentaría al otro día en un foro internacional.

Llegaba a mi mente mi país, mis alumnos, la universidad donde trabajo y sobre todo la paciente que dio todos los derechos para poder ser publicado su caso.

¿Cuál es su diente favorito y por qué?

Mi diente favorito es el primer molar superior. Es un diente enigmático, es poderoso. Este, junto con el primer molar inferior son de los dientes más grandes. Además de que como periodoncista me encanta la furca, en la furca pueden existir submundos microbiológicos que pueden mermar la salud de la pulpa debido a la interconexión que tiene el conducto cavo interradicular con el ligamento periodontal. Así que, el primer molar superior es mi diente favorito porque también constituye todo un reto terapéutico.

¿Cuál ha sido su momento más importante en la odontología?

Desde el primer momento que pisé la Facultad de Odontología de la UNAM una de las cosas que siempre quise hacer fue ser profesor. Me costó mucho trabajo ser académico de la universidad. Yo empecé a dar clases a los 23 años gracias a un gran maestro que me indujo y me guio, el Dr. Juan Francisco Salcido García. El me orientó y prácticamente me salvó la vida. Pero el llegar a ser profesor definitivo dentro de la UNAM requiere de realizar un examen llamado de oposición que fue uno de los más significativos de mi vida. He hecho ya en mi haber tres exámenes profesionales, pero este examen abierto con grupo presente fue una experiencia inigualable. He tenido momentos de ensueño en mi carrera de conferencista. Me he tenido que ganar la confianza de un público que me sigue en diferentes países y que llena auditorios, pero sin duda nada sería de mí sin ser profesor de la máxima casa de estudios de México. Orgullosamente UNAM.

¿Si estuviera perdido en una isla desierta y pudiera llevar un instrumento de Hu-Friedy, cual sería y por qué?

iWow! En una isla desierta uno necesitaría sobrevivir, quizá el espejo HD de Hu-Friedy me llevaría para producir fuego. Pero, ahora que contesto esta pregunta no puedo dejar de pensar en uno de mis libros favoritos de mi infancia, la obra de Daniel Defoe "Robinson Crusoe". Con referencia a esta historia y pensando que estaría en una isla desierta, y que en dado caso tendría que buscar alimento, construir mi vivienda e incluso defenderme, quizá un mango de bisturí con una hoja quince podría ser más útil.

ENTREVISTA CON LA GANADORA DEL CONCURSO MUNDIAL DE DOBLAJE DE ALAMBRE HU-FRIEDY 2016

¿Cómo se dio cuenta del concurso?

Hace algunos años me enteré que existía el concurso pero lamentablemente ya había pasado la fecha de inscripción. El año pasado, cuando estaba haciendo prácticas de doblado de alambre, me acordé que existía el concurso y lo busqué de nuevo. Pensé que no tenía nada que perder si participaba, así que decidí enviar mis trabajos.

¿Cómo se le ocurrió la idea de la figura que ganó en el concurso de doblaje de alambre?

Ya que mi serie favorita es Game of Thrones, pensé en recrear alguna estructura o personaje de la serie y se me ocurrió hacer espadas y formar un Iron Throne. Las espadas las realicé con material de bandas para Ortodoncia y utilicé otros alambres de ortodoncia para las empuñaduras y la estructura de la silla.

Me gusta mucho la película de Breakfast at Tiffany's y me basé en la portada de la película para formar la silueta del personaje principal.

¿Cómo recibió la noticia?


Me enviaron un email informándome de la noticia y los resultados los publicaron a través de la página de Facebook de Hu-Fiedy.

¿Cuál fue el premio?

Gané las dos categorías del concurso, así que recibí \$3,500 dólares en instrumental de Ortodoncia de la marca Hu-Fiedy. Seleccioné pinzas de corte y de doblado para Ortodoncia.

¿Qué piensa del premio?

Creo que el premio es muy útil y motivador para los especialistas en Ortodoncia. Les recomiendo enviar sus trabajos y tomar este concurso como una oportunidad de poner en práctica sus habilidades manuales y creativas para salir un poco de lo cotidiano participando en una sana competencia con otros Dentistas alrededor del mundo.

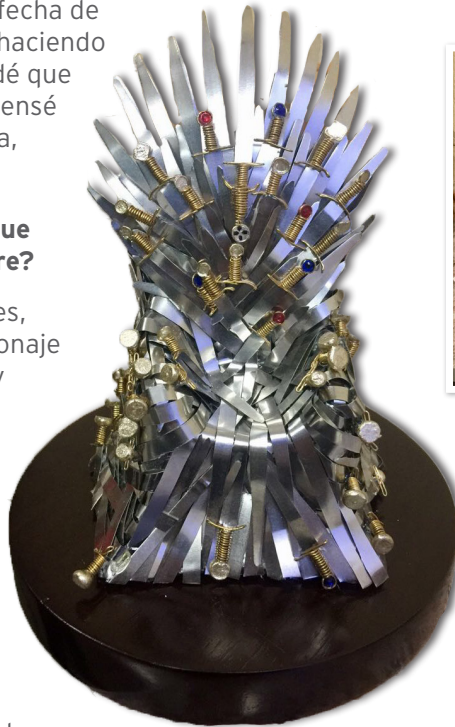

El posgrado de Ortodoncia de la Universidad Autónoma de Nuevo León, El Dr. José Antonio Vera y algunos de sus alumnos fueron testigos de la entrega del premio que tuvo como ganadora a la Dra. María Andrea Guajardo Barbosa, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Hu-Friedy

HU-FRIEDY EN LA REGIÓN



Alumnos del posgrado de la maestría en Odontología Avanzada atendiendo el taller de afilado de Hu-Friedy en la materia de Periodoncia con la Dra. Brenda Ruth Garza.



Las felices ganadoras de instrumental durante la charla sobre Selección y Mantenimiento del Instrumental en la Universidad de Cartagena, Colombia.



Curso de Alargamiento Coronario que se llevó a cabo el 24 y 25 de Marzo por el Dr. Gerardo Guzmán en Colima, México.




HU-FRIEDY EN LA REGIÓN

Christian García del Depósito Dental Politécnico recibió el Golden Scaler por los 15 años de asistencia al Seminario de Distribuidores, México, 2017. ▼

Devale Ltda visita las instalaciones de Hu-Friedy! ▼



▶ Hu-Friedy dio una Charla sobre Selección y Mantenimiento del Instrumental en la Universidad Metropolitana de Barranquilla, Colombia el pasado 24 de marzo.

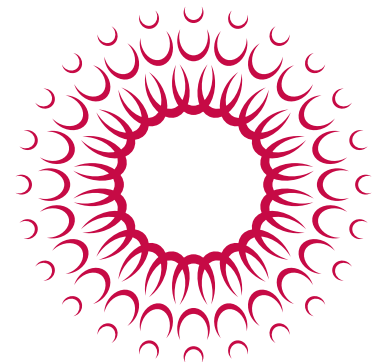


Hu-Friedy

HU-FRIEDY EN LA REGIÓN

Hu-Friedy estuvo presente en el 100 Aniversario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo - CECONEXPO, en Morelia, México.



Nevi y Hu-Friedy, a través de Promovago, estuvieron presentes en el XXV Congreso Multidisciplinario CONL en Monterrey, México

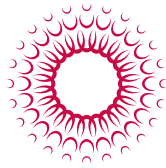

El pasado mes de mayo se llevó a cabo el XV Seminario de Distribuidores Hu-Friedy en México.



Hu-Friedy

HU-FRIEDY EN LA REGIÓN



Algunos ganadores de baby Nevi y Contrangulos Desechables para Profilaxis de Hu-Friedy durante AMIC mayo 2017.




HU-FRIEDY EN LA REGIÓN



La Dra. Brenda Carolina Venegas Garza, ganadora del "Golden Scaler de Hu-Friedy" en el Seminario Plenario de Odontología 2017 Tecnológico de Monterrey.

Hu-Friedy a través de Artículos Dentales Portales y Depósito Dental Villa de Cortés participó en AMIC mayo 2017 en la Ciudad de México.

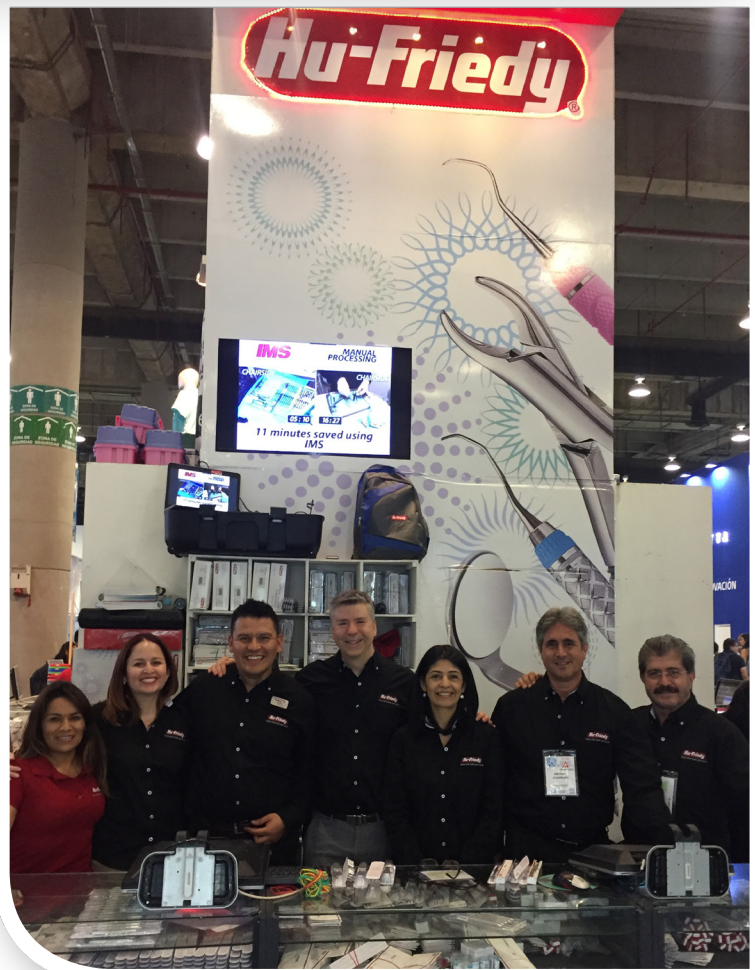

EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN AMÉRICA LATINA PRESENTADO POR HU-FRIEDY

En esta sección del Explorador de Hu-Friedy les vamos a presentar artículos científicos, reportes de caso, revisiones bibliográficas de un tema en específico y descripciones de diferentes técnicas de tratamientos. Esto, siempre con el compromiso de que sea de producción de nuestros propios doctores de América Latina. Es una manera de divulgar el conocimiento de forma gratuita a todos nuestros lectores.

Para presentar aquí su producción por favor escriba al siguiente correo electrónico lsanchez@hu-friedy.com

REPORTE DE CASO

COBERTURA RADICULAR CON INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO CON LA TÉCNICA DE SOBRE SIN EL USO DE SUTURA

Dr. Carlos Alberto Monteagudo Arrieta

Especialista en Periodoncia e Implantología


Profesor de la Facultad de Odontología de la U.N.A.M

Conferencista Internacional

Autor de artículos científicos en el área de Periodoncia e Implantología

Parte del cuerpo colegiado fundador de la especialidad de Odontología

El objetivo de este caso clínico es mostrar el resultado clínico de cobertura radicular con el uso de la técnica de sobre modificado con el empleo de Injerto de Tejido conectivo y proteínas de la matriz del esmalte sin sutura.

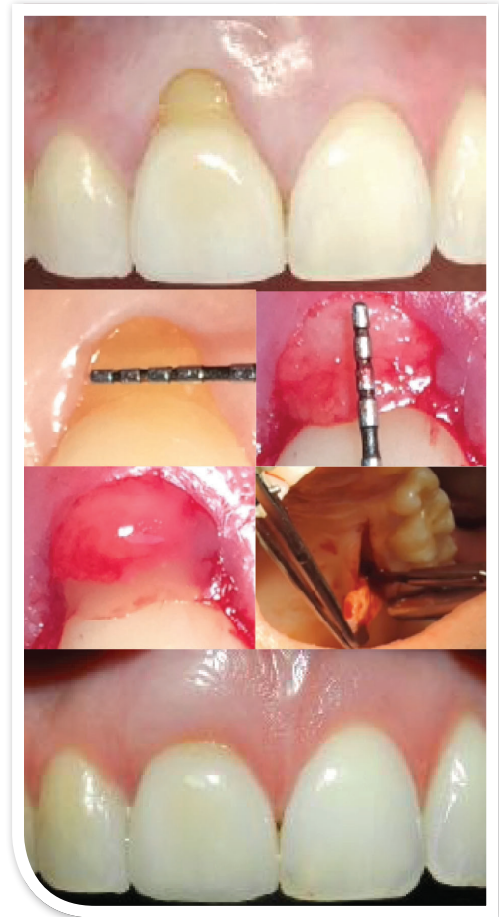


[Para leer más dar clic en la imagen](#)

Hu-Friedy

¿NEGLIGENCIA SUPERVISADA?

ARTÍCULO PREVIAMENTE PUBLICADO EN LA REVISTA DE JUNIO 2017 DE RDH

Un artículo interesante de Tami Wanless, RDH, MED, donde habla del papel de los odontólogos en el reconocimiento y cómo evitar la "Negligencia Supervisada" en relación con los restos de cálculo que quedan después de una limpieza.

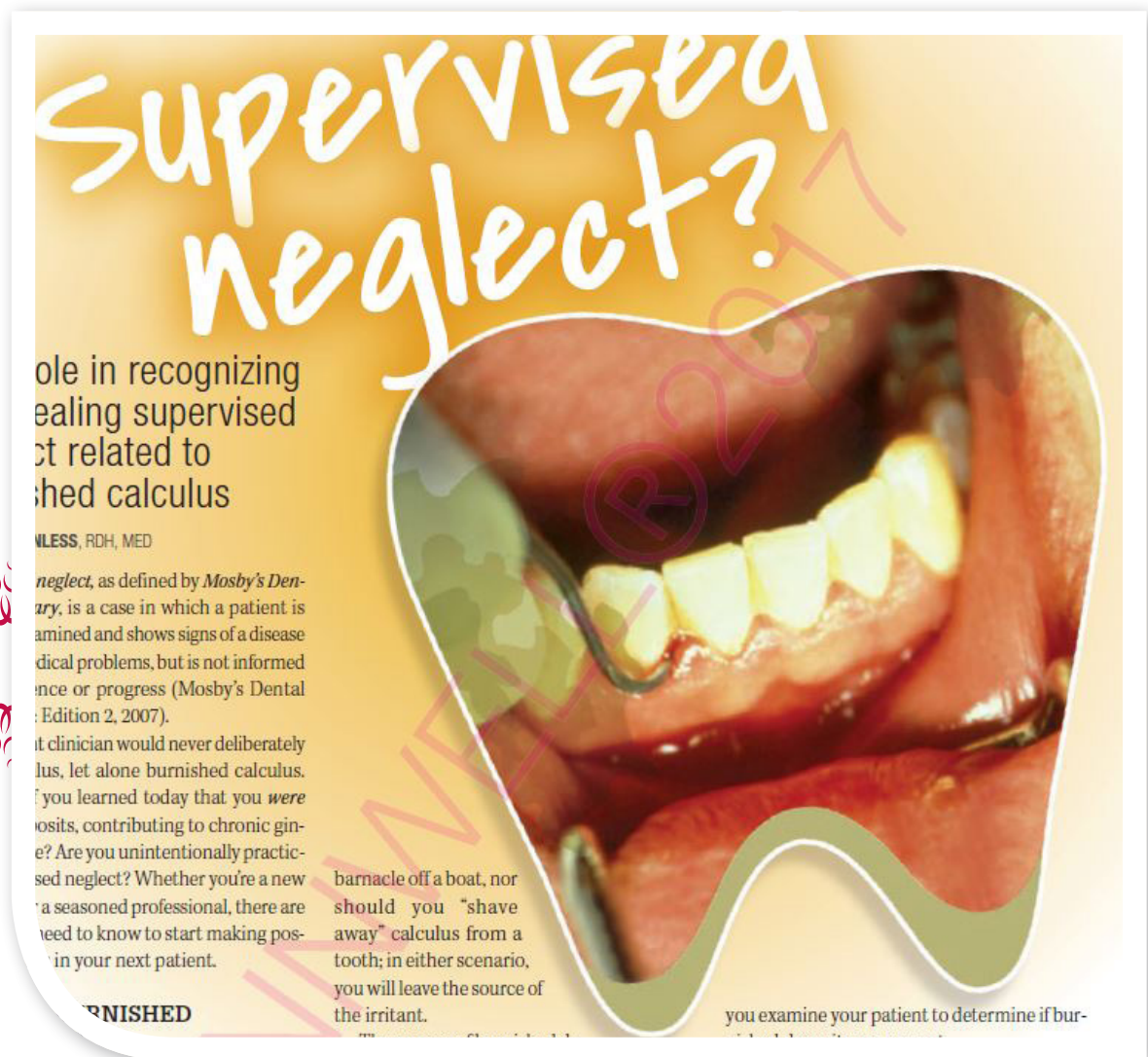

[Para leer más dar clic en la imagen](#)

Hu-Friedy

EL VALOR DEL AFILADO DRA. CONSOLATA PEJRONE

ARTÍCULO PREVIAMENTE PUBLICADO EN LA REVISTA
IDS 2017 DE HU-FRIEDY

¿POR QUÉ HAY QUE AFILAR LOS INSTRUMENTOS? O MÁS BIEN, ¿POR QUÉ HAY QUE CONTINUAR ADQUIRIENDO INSTRUMENTOS QUE SÍ PUEDEN SER AFILADOS?

La industria moderna de hoy en día anda siempre en la búsqueda de materiales que son resistentes al desgaste para disminuir el deterioro de la hoja de corte de los instrumentos periodontales. Algunas compañías ofrecen instrumentos hechos de aleaciones que son muy duras, sin embargo no pueden ser afilados y su vida útil es difícil de predecir.

Por varias décadas, Hu-Friedy ha fabricado instrumentos hechos de aleaciones más resistentes, que requieren un afilado menos frecuente y que ofrecen mayor retención del filo. Un valor agregado de este tipo de instrumentos es que el usuario tiene el control total del filo de su instrumento, y puede ajustarlo de acuerdo al uso que le quiere dar -remoción de placa o alisado radicular. La gran variedad de instrumental disponible hace que un instrumento que pueda ser afilado de acuerdo a la necesidad, sea la mejor opción para los doctores que hacen tratamientos periodontales no quirúrgicos. El afilado es fácil y rápido de hacer para los que están acostumbrados a manejar instrumentos periodontales, sin embargo puede ser desalentador para algunos.

Por eso, en Hu-Friedy ofrecemos cursos especializados en el afilado de instrumentos periodontales. Así, los usuarios pueden aprender una técnica sencilla y correcta, para asegurar una vida útil larga de sus instrumentos y mantener su desempeño al máximo.

**También es importante considerar que en las cirugías dentales también se va a usar una variedad de instrumentos que se benefician del afilado regular. Por eso es importante conocer cómo es que se afilan y se mantienen correctamente.*

[HU-FRIEDY WEBINARS](#)

EN RESUMEN, LAS VENTAJAS DE AFILAR LOS INSTRUMENTOS SON:

- 1** **Larga vida**
y mayor durabilidad
- 2** **Reposición menos frecuente**
del instrumental
- 3** **Mayor control**
durante el tratamiento
- 4** **Variedad más amplia**
de instrumentos

Hu-Friedy

PRÓXIMOS EVENTOS

2017

¡Visítenos en los próximos eventos!
Para más información mande un
correo electrónico a
L.Sanchez@hu-friedy.com

ARGENTINA

8 al 10 de Junio

EVENTO LÍDER DE OPINIÓN

22º Jornadas Odontológicas Internacionales
del Centro de la República
Tema: Actualidades en la periodontología
contemporánea
Dr. Carlos Monteagudo
Hotel Sheraton, Córdoba
[Mas Información](#)

23 y 24 de Junio

14 y 15 de Julio

4 y 5 de Agosto

8 y 9 de Septiembre

13 y 14 de Octubre

17 y 18 de Noviembre

EVENTO LÍDER DE OPINIÓN

+ Perio
Curso de Posgrado de Cirugía Plástica
Periodontal, Periimplantaria y Regeneración
Ósea. Módulos mensuales.
Dr. Axel Endruhn
Clínica Bairesmile, Av. Rivadavia 1934 Planta Baja,
Ciudad de Buenos Aires
masperiocirugia@gmail.com
cursos@bairesmile.com.ar

8 de Agosto

EVENTO LÍDER DE OPINIÓN

+ Perio + Ortodoncia: Integración de Disciplinas.
Dr. Axel Endruhn, Dr. Gastón Crespi
Lugar: Fundación Osde, Av. Leandro N. Alem 1067;
Retiro, Buenos Aires

Septiembre

Medicina Dental Miriam Bermolen - Cursos
Virtuales con Workshop y
Actividad Clínica Presencial
Buenos Aires
[Mas Información](#)

25 al 28 de Octubre

EVENTO LÍDER DE OPINIÓN

Congreso AOA, 39 Jornadas Internacionales
Los Profesores responden preguntas a la carta.
Dr. Axel Endruhn.
Sheraton Hotel & Convention Center en
Buenos Aires

BOLIVIA

8 al 9 de Junio

EVENTO LÍDER DE OPINIÓN

VII Congreso Internacional de Periodoncia
Conferencia: Aplicación de Procedimientos de
Cirugía Plástica Periodontal y Regeneración en
pos de la Optimización Estética.
Dr. Axel Endruhn
Hotel Camino Real, La Paz

10 de Junio

EVENTO LÍDER DE OPINIÓN

Hands On: Técnicas de Cirugía Plástica
Periodontal.
Dr. Axel Endruhn
Clínica Arte Dental Terán, La Paz, Bolivia

29 y 30 de Agosto

EVENTO LÍDER DE OPINIÓN

+ Perio: Workshop de Cirugía Plástica Periodontal:
Tunelización de los tejidos.
Dr. Axel Endruhn
Sucre, Bolivia

31 de Agosto

EVENTO LÍDER DE OPINIÓN

XXII Congreso Internacional de Odontología
C.I.O 2017
+ Perio: "Cirugía Plástica Periodontal y
Regeneración. Aplicación de conceptos y técnicas
de microcirugía a diversos desafíos clínicos.
Dr. Axel Endruhn
Centro de Convenciones del hotel Los Tajibos
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

BRASIL

8 al 10 de Junio

EVENTO LÍDER DE OPINIÓN

VI Congreso Internacional de Odontología de
Santa Catarina: Manejo de dientes permanentes
inmaduros afectados por trauma dentoalveolar -
Protocolo de tratamiento.
Dra. Patricia Becerra
Florianópolis, SC
[Más información](#)

PRÓXIMOS EVENTOS

2017

CHILE

13 de Junio

EVENTO LÍDER DE OPINIÓN

"Actualidades periodontales y peri-implantares, un reto clínico para la odontología contemporánea,

Dr. Carlos Monteagudo

Colegio de Cirujano Dentistas de Chile, Santiago

[Más información](#)

22 y 24 de Junio

EVENTO LÍDER DE OPINIÓN

Diplomado de Cirugía Plástica Periodontal

Dr. Cristian López

Santiago

27 al 29 de Julio

EVENTO LÍDER DE OPINIÓN

Diplomado de Cirugía Plástica Periodontal

Dr. Cristian López

Santiago

24 al 26 de Agosto

EVENTO LÍDER DE OPINIÓN

Diplomado de Cirugía Plástica Periodontal

Dr. Cristian López

Santiago

28 al 29 de Septiembre

EVENTO LÍDER DE OPINIÓN

Diplomado de Cirugía Plástica Periodontal

Dr. Cristian López

Santiago

4 al 7 de Octubre

IAPD

Marriot, Santiago

[Más información](#)

19 al 21 de Octubre

EVENTO LÍDER DE OPINIÓN

Jornadas Perio Day

Dr. Cristian López

Santiago

23 al 25 de Octubre

EVENTO LÍDER DE OPINIÓN

Diplomado de Cirugía Plástica Periodontal

Dr. Cristian López

Santiago

COLOMBIA

14 y 15 de Julio (Primer módulo)

EVENTO LÍDER DE OPINIÓN

Diplomado: Actualización en Endodoncia para Endodoncistas.

Dra. Patricia Becerra.

Federación Odontológica

Colombiana, Bogotá

[Más Información:](#)

diplomadosfoc@gmail.com

+57 312 4345845

24 y 25 de Julio

EVENTO LÍDER DE OPINIÓN

Ortodoncia Mínimamente Invasiva.

Dr. Juan Carlos Tamara

Bogotá

[Más información:](#)

Daniela Valderrama

+5713175751177

31 de Agosto al 2 de Septiembre

Congreso Nacional de Endodoncia. 5to Encuentro Latinoamericano de Investigación.

Bucaramanga

14 al 16 de Septiembre

XXXV Congreso Internacional de Ortodoncia

Santa Marta

25 al 27 de Septiembre

57 Seminario Anual de Periodoncia. Periodoncia Contemporánea.

Cartagena

27 y 28 de Octubre

61 Congreso Internacional de Protoponcia

Cartagena

MEXICO

7 al 10 de Junio

AME Nacional de Endodoncia

León, Guanajuato

[Más información](#)

10 de Junio

Desayuno Oral B

Yahualica, Nochistlán Jalisco



PRÓXIMOS EVENTOS

2017

MEXICO

12 al 15 de Junio

EVENTO LÍDER DE OPINIÓN

Curso con pacientes en vivo sobre Manejo de Extracción y Colocación de Implantes.

Dr. Manuel De la Rosa

Puebla

13 y 14 de Junio

Talleres de Afilado UAG Pregrado,

Instalaciones UAG

Guadalajara, Jalisco

29 de Junio al 1 de Julio

Aniversario Depósito Dental Santa Fé

Aguascalientes, Aguascalientes

21 de Julio

EVENTO LÍDER DE OPINIÓN

Emdogain Tour.

Dr. Carlos Monteagudo

Ciudad Juarez, Chihuahua

27 al 30 de Julio

EVENTO LÍDER DE OPINIÓN

Curso con Hands-on sobre Manejo de Extracción y Colocación de Implantes en figurado.

Dr. Manuel De la Rosa

Estambul, Turquía

5 de Agosto

EVENTO LÍDER DE OPINIÓN

Emdogain Tour.

Dr. Carlos Monteagudo

Hotel Fortin Plaza, Oaxaca

11 y 12 de Agosto

EVENTO LÍDER DE OPINIÓN

Parámetros Biológicos y Estéticos para el manejo de sonrisa gingival

Dr. Carlos Monteagudo

Mérida, Yucatán

[Más información](#)

24 al 26 de Agosto

EVENTO LÍDER DE OPINIÓN

Relación Perio-Prosto en la consulta diaria.

Curso con cirujías en vivo en pacientes.

Dr. Manuel De la Rosa

Monterrey

30 de Agosto al 2 de Septiembre

AMP Nacional de Periodoncia

Guadalajara

[Más información](#)

5 de Septiembre

EVENTO LÍDER DE OPINIÓN

Participación como conferencista en el

congreso de la Asociación Dental de Tlaxcala.

Dr. Manuel De la Rosa

Tlaxcala

8 al 9 de Septiembre

EVENTO LÍDER DE OPINIÓN

Rocking Dentistry

Victor Cuervo

Monterrey

[Más información](#)

12 al 13 de Octubre

EVENTO LÍDER DE OPINIÓN

Curso Cirugía Plástica Periodontal para el dentista General.

Dr. Manuel De la Rosa

Monterrey

18 al 20 de Octubre

EVENTO LÍDER DE OPINIÓN

Curso Hands-on en el congreso de la

Asociación de Ortodoncia de Durango.

Dr. Manuel De la Rosa

Mazatlán, Sinaloa

26 al 28 de Octubre

Dentalfest

Monterrey

[Más información](#)

PERÚ

29 al 30 de Junio

EVENTO LÍDER DE OPINIÓN

Periodoncia

Dr. Cristian López

Lima



[Desea suscribirse?](#)

Visite nuestro sitio Hu-Friedy.com

Sus comentarios, preguntas y sugerencias son importantes para nosotros. Póngase en contacto: lsanchez@hu-friedy.com

Hu-Friedy