


Adaptateur Safe-Flo™

REF M1020ADAP

MODE D'EMPLOI

1. Insérez l'extrémité de l'éjecteur de salive dans l'extrémité bleue de l'adaptateur.

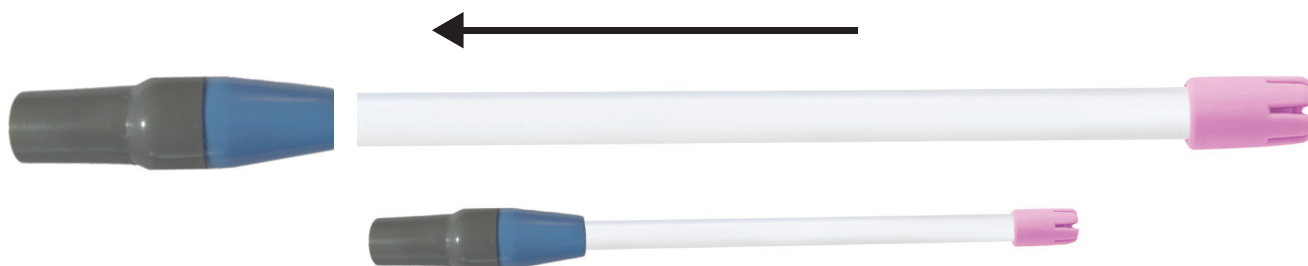

2. Insérez l'association éjecteur de salive / vanne dans l'extrémité ouverte de la ligne d'aspiration à évacuation élevée de volume.
3. Courbez le tube de l'éjecteur de salive selon la position désirée, puis placez-le dans la bouche.
4. Après un usage unique sur un patient, jetez l'association éjecteur/vanne dans la poubelle classique.

CROSSTEX



Crosstex International, Inc.
6789 W. Henrietta Road, Rush, NY 14543 USA
585.359.0130 | 631.582.6777 | crosstex.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



GH REP STERIS GmbH c/o BDO AG,
Längfeldweg 116A,
CH-2504 Biel-Bienne,
SWITZERLAND



Pour un usage professionnel uniquement.
Produit fabriqué sans latex de caoutchouc naturel.

Fabriqué aux États-Unis

M1020ADAP-IFU-FR / REV D - 03/2022

En cas d'accident grave impliquant nos dispositifs au sein de l'Union Européenne, veuillez en informer Hu-Friedy Mfg. Co., LLC et votre autorité nationale compétente de l'état membre.

Sauf indication contraire, tous les noms de produits sont des marques de Hu-Friedy Mfg. Co., LLC., de ses filiales ou sociétés associées.

Brevet américain n° 8,256,464, 8,714,200, 8,752,579 et homologues étrangers.

©2022 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Tous droits réservés.