

ZH DentaPure™ 牙椅水路净化器

牙科诊疗用水微生物净化滤芯

使用说明

用于与动力器械相连接的牙科水路。不用于一般用途。净化效果可达 ≤ 10 cfu/mL的水质标准。

活性成分:碘*	46%
其它成分	54%
总计	100%

*与强碱性阴离子交换树脂结合


仅限专业使用
请放置在儿童无法触及之处

注意事项:意外暴露:请谨慎操作以避免接触树脂颗粒。如发生口腔接触,用吸唾器吸除。口腔接触尚未发现会造成重大健康风险。**急救:如果不慎入眼:**睁开眼睛,用水冲洗 15-20 分钟。(如佩戴隐形眼镜)冲洗 5 分钟后取下隐形眼镜,继续冲洗。请致电医生寻求治疗建议。**沾到皮肤/衣服上:**脱掉被污染的衣服。用水冲洗皮肤 15-20 分钟。**不慎误服:**请致电医生。如果可以,请饮用少量水。除非医生建议,否则不要催吐。请勿给无意识的人服食任何东西。致电医生时,请参阅产品标签。

建议使用表:

DentaPure 牙椅水路净化器	记录了用水量	未记录用水量	监测了碘浓度
DPC365B	240 升	365 天(日历年)	水中碘浓度低于 0.5ppm 时进行更换
DPC365M			

如果需要临时取出滤芯,请将其装入密封袋中,贴上标签并注明安装日期和诊室编号/名称。室温存放,直至重新安装回去。**丢弃:**用纸巾包裹并丢弃在普通垃圾桶中。

 Crosstex International, Inc.
6789 W. Henrietta Road
Rush, NY 14543 USA

DPC-IFU / REV B - 09/2024

All company and product names are trademarks of Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, its affiliates or related companies, unless otherwise noted.

©2024 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved.

对人体的危害:引起眼部刺激。避免接触眼睛、皮肤和衣物。佩戴护目镜和手套。处理滤芯后用肥皂和水洗手。被污染的衣服必须清洗后方可再次穿着。

使用说明:取下两端的盖帽。建议在安装前对水路进行冲击消毒处理。切勿使用功能正常/已耗尽的滤芯进行冲击消毒处理。滤芯安装后,请使用临时管路对水路进行冲击消毒。冲击消毒完成后,去除临时管路,重新安装上功能正常的滤芯。阻断或断开不使用的或额外的水路。建议不要使用水路加热系统。将水压设定为 40-50 psi。暂时不使用牙椅时,请将滤芯保留在原位。长期不使用时该如何处理,请与 Crosstex 联系。每天早上接诊患者前,请对每条水路冲洗 2 分钟,以保证碘浓度。储水罐:建议每晚倒掉储水罐中的水。倒置干燥储水罐或安装回去。请遵循储水罐制造商的要求对储水罐进行清洁处理。最佳实践:用清洁、干燥的纸巾擦拭滤芯,检查滤芯进水端是否有堵塞。如果储水罐上有保护罩,请忽略该步骤。每天早上给储水罐重新注入水。如果对滤芯处理的水量进行了记录,请后用新表记录。碘浓度测试条有助于验证滤芯接近使用寿命时的性能。滤芯到达使用寿命后,卸下已耗尽的滤芯,更换新的滤芯,以维持水中的碘浓度。请遵循牙椅水路监测指南对水质进行监测。

扫描获取安装说明
和保修登记。



CROSSTEX